

어르신 효도 건강자석 지팡이 PPS-200

국내최초 건강자석 지팡이

네오뎀 건강자석



건강+편의성 두가지를 동시에!
혈액순환과 만성통증이 좋아지는 효과!

네오뎀 건강자석의 뛰어난 효능

건강자석 손잡이 부분에 네오뎀 자석이 부착되어 있습니다. 네오뎀 자석은 일상생활 통증완화에 도움을 줄 수 있는 의료용 자석으로 사용되고 있는 활용도 높은 영구자석입니다. 네오뎀 자석은 높은 자력을 발휘하기 때문에 건강증진에 뛰어난 효과를 보입니다.

특히 **혈액순환에 좋으며 발목이나 종아리, 허반신 쪽 통증이 심하신 분들이 사용하시면 좋습니다.**
거동이 불편하신 분이나 고령자에게 더욱 강력히 추천드립니다.

거치용 철판 사용방법



1. 철판을 준비합니다.




2. 손잡이에 자석이 부착되어 있습니다. 철판위에 올려 붙여주세요.




철문일 경우 철판을 사용하지 않아도 쉽게 붙습니다.

지팡이 사용방법 및 주의사항


[사용방법]

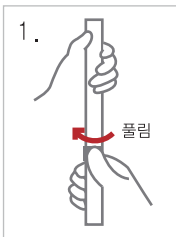

고정나사를 잡고 왼쪽으로 돌려 느슨하게 풀어주세요.

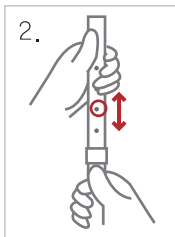

조절버튼을 누르고 적당한 구멍에 맞춰주세요.

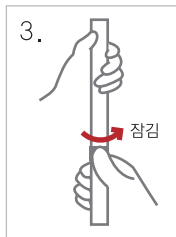

고정나사를 잡고 오른쪽으로 돌려 팍 조여서 사용해주세요.

[주의사항]

1. 사용 전 각 부분을 점검 후 사용해주세요.
2. 지팡이 용도 외에 사용하지 마시기 바랍니다.
3. 제자리에 선 상태에서 지팡이팁과 발끝과의 거리는 20cm, 팔꿈치 각도는 30~40도가 적당합니다.
4. 미끄러지기 쉬운 노면 등에서 사용을 주의하십시오.
5. 체중을 전부 실은 상태로는 사용을 금지합니다.
6. 도로의 하수구나 파인곳이 있는 장소에서는 지팡이가 끼일 수 있으므로 주의하여 주십시오.

건강자석 지팡이 PPS-200



BTP-2017-0788

제품명	건강자석 지팡이 PPS-200
사이즈	최소길이 75cm / 최대길이 100cm (신장 144cm~190cm)
무게	350g
A/S책임자 및 전화번호	사람을보호하는기업 051-311-2907